



ギプス包帯

専用シーネ + 母指手関節専用シーネホルダー

ハイブリッドシーネ サムスパイカ

専用シーネ × オープンタイプのシーネホルダーで 患部をしっかりとサポート



基本構成



シーネホルダー



サムスパイカ専用
ギブスシーネ

ステー

固定力



快適性

固定力

Point 1

スピーディーな処置が可能な 母指手関節専用のギブス包帯

専用シーネをシーネホルダーにセットし装着するだけでスピーディーなギブス処置が可能です。シーネは予めフィットしやすい形状にカットされて不織布カバーに覆われているため、加工が不要で手が汚れることもなくスムーズに処置ができます。



患部にフィットする専用シーネを差し込むだけで簡単に処置できます。

Point

2

患部の形状に合わせて しっかりホールド

掌側に専用シーネ、甲側にアルミ製のステーを配置し、母指の内転、外転および手関節の背屈、掌屈の動きを制限し患部をしっかりとホールドします。



ステー

専用シーネ

Point
1

オープンタイプで 形状を問わず装着しやすい

シーネホルダーはオープンタイプで母指を曲げずに装着可能。手を通して各種ストラップをとめるだけなので、痛みのある状態でも着けやすく患者様の負担を軽減するデザインです。

手を通す



各種ストラップ、
面ファスナーをとめる



モールドイングする



母指・手関節部を包み込むシーネホルダーと各種ストラップにより手の形状や患部の状態に合わせてフィット感の調整が可能です。

ストラップはコカンから抜けにくい仕様になっているため、処置後は手を通すだけで簡単に装着できます。



Point
2

衛生的に使用可能


サポーター型のシーネホルダーのため、においや蒸れが気になるときに患部の状態によっては清拭したり、洗ったりすることができ、患者様に快適に装着いただけます。また、シーネホルダーは洗濯できるため衛生的に装着できます。



Point
3

日常生活を 妨げない形状

母指はしっかりと固定しつつ、母指以外のMP関節の可動域を妨げない形状です。

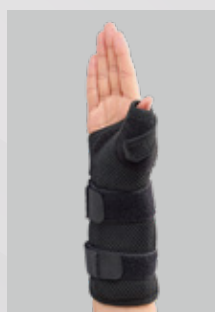

ハイブリッドシーネ サムスパイカ



品番	種類	適用範囲 (手首周囲)
198602	右M	13 cm ~ 16 cm
198603	右L	16 cm ~ 19 cm
198612	左M	13 cm ~ 16 cm
198613	左L	16 cm ~ 19 cm



- サイズの選び方
手首の周囲に合わせて選んでください。
手首の周囲が一番細いところを計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを
選んでください。

ハイブリッドシーネ サムスパイカの
装着動画はこちらから



ハイブリッドシーネシリーズ
製品ページはこちらから



【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 使用する水の温度を、25℃より高くしないこと。
[化学反応による発熱から低温熱傷を引き起こすおそれがあるため。]
- 創傷に直接当てないこと。

販売名:ハイブリッドシーネ サムスパイカ
一般的名称:ギプス包帯(JMDNコード:33056000)
医療機器分類:一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000049

保険情報

ハイブリッドシーネシリーズはギプス処置の際にギプス材として使用できる製品です。

ギプス料 区分番号:J122 四肢ギプス包帯 J123 体幹ギプス包帯

<第9部 処置-ギプス>

- 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
- 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
- 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

<ギプス料>

J122 四肢ギプス包帯	
1.鼻ギプス	310点
2.手指及び手、足(片側)	490点
3.半肢(片側)	780点
4.内反足矯正ギプス包帯(片側)	1,140点
5.上肢、下肢(片側)	1,200点
6.体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側)	1,840点
J123 体幹ギプス包帯	1,500点

令和6年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。